

RAT & TAT - PROGRAMMIERUNG SINA

BENÖTIGTES ZUBEHÖR




Programmierkabel
links=blau, rechts=rot
105 40 985, 105 40 984

VORBEREITUNG ZUR PROGRAMMIERUNG

Schritt 1:

Öffnen Sie das Batteriefach wie in der Abbildung beschrieben.

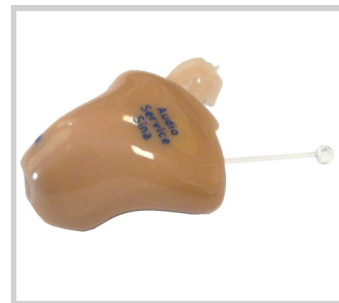


Schritt 2:

Fassen Sie nun den Batteriefachdeckel mit Daumen und Zeigefinger an. Nun kippen Sie den Batteriefachdeckel seitlich von der Achse ab.

Schritt 3:

Führen Sie den Programmierstecker so in das Batteriefach ein, dass er mit dem dafür vorgesehenen Haken (H) in die Achse (A) einrastet.

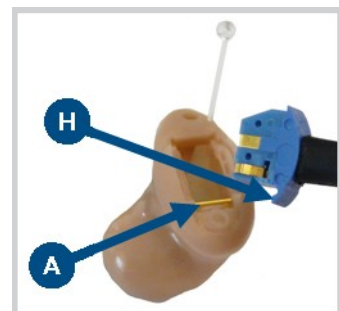

Bitte achten Sie bei Verwendung von zwei Geräten unbedingt auf die Seitenkennung der Batteriefachdeckel (rechts und links)!