

# RAT & TAT - PROGRAMMIERUNG VEGA/IDA

## BENÖTIGTES ZUBEHÖR



### Programmierkabel

links=blau, rechts=rot

029 44 994, 029 44 986 (lange Kabel)

370 81 66, 370 81 58 (kurze Kabel)



### Programmieradapter

für HiPro-Kabel

072 02 901

## VORBEREITUNG ZUR PROGRAMMIERUNG

Für die Programmierung des Vegas/Idas über Connexx steht ein spezieller Programmieradapter zur Verfügung. Dieser Adapter kann an das serienmäßige HiPro-Kabel mit 4-poligem Stecker angeschlossen werden. Zum Programmierung muss das Modulgehäuse immer in die Rastplatte eingerastet werden, da sonst Kontaktprobleme beim Programmieren auftreten können.

### Schritt 1:

Setzen Sie den Programmieradapter bei nach oben geöffnetem Batteriefach so in das Gerät ein, dass die Kontakte auf der einen Seite des Programmieradapters zum Plus-Kontakt des Gerätes zeigen.

### Schritt 2:

Bei der Programmierung der Geräte direkt im Ohr legen Sie das Programmierkabel über das Ohr, um eine für den Hörsystemträger angenehme Zugentlastung für Kabel und Gerät zu ermöglichen.

